

Clearblue®

Test de grossesse

Détection Ultra Précoce

- Fiable à plus de 99 % dès la date présumée de vos règles.
- **Lisez attentivement cette notice avant de faire le test.**

1 À quel moment faire le test ?

Capuchon Tige contrôle



- Vous pouvez effectuer un test jusqu'à 6 jours avant la date de retard de vos règles, ce qui correspond à 5 jours avant la date présumée de vos règles.
- Si vous faites le test avant la date présumée de vos règles, utilisez les premières urines du matin. Sinon, vous pouvez faire le test à tout moment de la journée.
- Évitez de trop boire avant d'effectuer le test.

2 Effectuez le test

A



JET D'URINE

Vous devez maintenir la tige contrôle dans votre jet d'urine pendant exactement 5 secondes.

- Retirez la pochette protectrice et ôtez le capuchon. **Utilisez le test immédiatement.**

Choisissez votre méthode de test

- **IMPORTANT : la tige contrôle se colore instantanément en rose pour indiquer qu'elle absorbe l'urine.**

OU

B



ÉCHANTILLON RECUEILLI

Comptez 20 secondes à partir du moment où la tige contrôle se colore en rose.

Vous devez immerger entièrement et uniquement la tige

- A Maintenez la tige contrôle dans votre jet d'urine pendant exactement 5 secondes.

OU

- B Pendant exactement 20 secondes, immergez complètement et uniquement la tige dans un échantillon de votre urine que vous aurez recueilli dans un récipient propre et sec.

- Si la tige contrôle n'est pas devenue complètement rose, reportez-vous à la question 7.
- Remplacez le capuchon et posez le bâtonnet-test à plat.
- Commencez à chronométrer.


3 minutes

PATIENTEZ PENDANT LA TOTALITÉ DES 3 MINUTES

Avant de procéder à la lecture de votre résultat

3 Lisez votre résultat

FENÊTRE DE RÉSULTAT FENÊTRE TÉMOIN

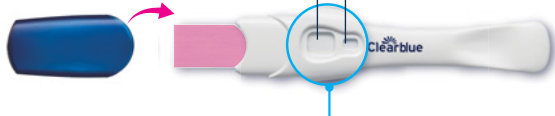

PAS ENCEINTE

SI VOUS VOYEZ DEUX LIGNES, VOUS ÊTES ENCEINTE



Image A



Image B



Image C



Image D

SI LES LIGNES SONT PLUS PÂLES OU PLUS FONCÉES, CELA N'A PAS D'IMPORTANCE.

- Il est possible qu'une ligne commence à apparaître rapidement dans la fenêtre témoin, mais vous **DEVEZ** attendre 3 minutes avant de procéder à la lecture de votre résultat. Si aucune ligne bleue n'apparaît dans la fenêtre témoin, cela signifie que le test n'a pas fonctionné (voir question 8).
- Si votre résultat est « **Pas Enceinte** », reportez-vous à la question 4.
- Si votre résultat est « **Enceinte** », reportez-vous à la question 3.
- Si vous n'êtes toujours pas sûre de votre résultat, reportez-vous à la question 9.

IMPORTANT ! Vous devez lire le résultat au plus tard **10 minutes** après avoir fait le test. Ne prenez pas en compte d'éventuels changements passé ce délai.

- 1 Comment le test Clearblue fonctionne-t-il ?**
Lorsque vous êtes enceinte, votre organisme sécrète une hormone de grossesse, la gonadotrophine chorionique humaine (hCG). Ce test peut détecter des quantités infimes de cette hormone dans vos urines (la sensibilité de ce test est de 10 mIU/ml).
- 2 Quand puis-je effectuer le test Clearblue Détection Ultra Précocoe ?**
Vous pouvez effectuer un test jusqu'à 6 jours avant la date de retard de vos règles (ce qui correspond à 5 jours avant la date présumée de vos règles). Si vous effectuez le test avant la date présumée de vos règles et que vous obtenez un résultat « Pas Enceinte », il est cependant possible que vous soyez enceinte. Reportez-vous au tableau ci-dessous, qui illustre les résultats de tests en laboratoire menés sur des échantillons d'urine recueillis chez des femmes enceintes en tout début de grossesse.

Détection précoce de la grossesse

Nombre de jours avant la date présumée des règles	% d'échantillons provenant de femmes enceintes donnant un résultat « Enceinte »
0	>99 %
1	>99 %
2	>99 %
3	>99 %
4	96 %
5	79 %

- 3 Mon test indique que je suis enceinte. Que dois-je faire ?**
Vous devez consulter votre médecin, qui vous indiquera les étapes et les démarches à suivre.
- 4 Mon test indique que je ne suis pas enceinte, mais je pense tout de même que cela est possible. Que dois-je faire ?**
Il se peut que vous ne soyez pas enceinte ou que le taux d'hormone hCG ne soit pas suffisamment élevé pour être détecté, ou encore que vous vous soyez trompée dans le calcul de la date présumée de vos règles. Si vous avez effectué le test trop tôt, effectuez un nouveau test à la date présumée de vos règles. Si vous avez un retard de règles, effectuez un nouveau test 3 jours plus tard. Si ce test indique un résultat « Pas Enceinte » mais que vous n'avez toujours pas vos règles, consultez votre médecin.
- 5 J'ai auparavant effectué un test et le résultat était « Enceinte ». J'ai effectué un nouveau test et obtenu un résultat « Pas Enceinte », ou mes règles ont débuté. Qu'est-ce que cela signifie ?**
Le test peut déceler l'hormone de grossesse avec une fiabilité supérieure à 99 % dès la date présumée de vos règles ; il est néanmoins possible que vous obteniez un résultat « Enceinte » et que vous découvriez plus tard que vous ne l'êtes pas (c.-à-d., vous pouvez refaire un test et obtenir un résultat « Pas Enceinte », ou vos règles peuvent commencer). Il peut s'agir d'une fausse couche naturelle survenant en début de grossesse (fausse couche spontanée), un phénomène qui n'est hélas pas rare et qui touche environ 1 grossesse sur 4. Si vous obtenez des résultats inattendus, demandez conseil à votre médecin.

- 6 Certains médicaments ou certains états médicaux peuvent-ils affecter le résultat ?**
Lisez systématiquement les instructions du fabricant relatives aux médicaments que vous prenez actuellement avant d'effectuer un test. Les médicaments contenant l'hormone hCG peuvent affecter le résultat. Une grossesse extra-utérine ou une grossesse récente (même si elle n'a été menée à terme) peut entraîner des résultats erronés. Si vous êtes en période de ménopause ou de pré-ménopause, il se peut que vous obteniez un résultat « Enceinte » erroné, même si vous n'êtes pas enceinte. Le test ne devrait pas être affecté par la prise de traitements hormonaux contenant du citrate de clomifène, d'antalgiques, d'alcool, d'antibiotiques ou de la pilule contraceptive. Si vous obtenez des résultats inattendus, parlez-en à votre médecin.
- 7 Lorsque j'ai effectué le test, la tige contrôle ne s'est pas entièrement colorée en rose. Que dois-je faire ?**
Il est possible que la tige contrôle n'ait pas été suffisamment imbibée d'urine ; si une ligne bleue apparaît malgré tout dans la fenêtre témoin au plus tard 10 minutes après la réalisation du test, alors celui-ci a correctement fonctionné. Si aucune ligne bleue n'apparaît dans la fenêtre témoin au bout de 10 minutes après avoir effectué le test, reportez-vous à la question 8.
- 8 J'ai effectué le test mais aucune ligne bleue n'est apparue dans la fenêtre témoin. Que dois-je faire ?**
Si vous avez effectué le test il y a plus de 10 minutes, alors celui-ci n'a pas fonctionné. Causes possibles :
 - la tige contrôle n'a pas été maintenue orientée vers le bas ou le bâtonnet-test n'a pas été posé à plat après avoir été imbibé d'urine ;
 - la tige contrôle a été imbibée de trop ou trop peu d'urine.
Effectuez un nouveau test en utilisant un nouveau bâtonnet-test et en veillant à bien respecter les instructions. Vous pouvez recueillir un échantillon d'urine et effectuer le test à l'aide de la méthode « Échantillon recueilli ».
- 9 Et si je ne suis pas sûre de mon résultat ?**
Veuillez vous référer aux illustrations de la section « Lisez votre résultat ».
- Image A :** Votre résultat est « Pas Enceinte ». Si vous pensez tout de même être enceinte, reportez-vous à la question 4.
- Images B-D :** Votre résultat est « Enceinte ». L'aspect de la ligne dans la fenêtre de résultat peut varier. Toutefois, il importe peu qu'elle soit plus pâle ou plus foncée : le résultat est « Enceinte ».
- Image B :** Ce type de résultat est plus susceptible d'être observé quand vous effectuez le test avant la date présumée des règles, alors que le taux de hCG peut être encore relativement faible.
- Image C :** Ce résultat est typique lorsque vous faites le test à la date présumée de vos règles ou à une date voisine.
- Image D :** Ce type de résultat est plus susceptible d'être observé lorsque vous effectuez le test plusieurs jours après la date présumée de vos règles, le taux de hCG étant plus élevé.
- Si vous doutez encore de votre résultat, attendez au moins 3 jours avant d'effectuer un nouveau test en suivant attentivement les instructions d'utilisation.

www.clearblue.com

Nos conseillères sont disponibles du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, sauf jours fériés.

0800 815 46

Appel gratuit depuis un poste fixe, peut être facturé depuis un mobile. Tous les appels sont enregistrés et peuvent être contrôlés pour assurer la qualité du service. Merci d'indiquer le numéro de lot.

Pour obtenir des informations sur les démarches à effectuer, des renseignements et des conseils sur des questions concernant la grossesse, rendez-vous sur notre site à l'adresse suivante : www.clearblue.com

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse.
Clearblue est une marque commerciale de SPD.
© 2019 SPD. Tous droits réservés.

Pour usage personnel à domicile.
Pour diagnostic *in vitro* uniquement.
Ne convient pas à une utilisation interne.
Ne pas réutiliser.
Garder hors de portée des enfants.
Conservé entre 2 et 30 °C.
En cas de stockage au réfrigérateur, sortir le dispositif et le laisser atteindre la température ambiante pendant 30 minutes avant de réaliser le test.
Ne pas utiliser si la pochette protectrice est endommagée.
Ne pas utiliser après la date de péremption.
Jeter avec les déchets ménagers habituels.

	Fabricant		Ne pas réutiliser
	Numéro de lot		Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i>
	Date de péremption		Température à ne pas dépasser 2 °C - 30 °C