


Clearblue®

FRANÇAIS

Test de grossesse
Détection Ultra Précoce

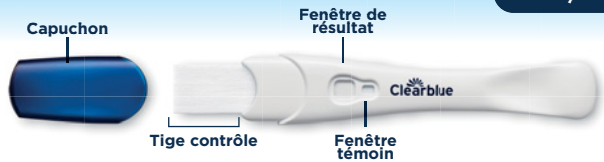

Destiné à un usage personnel. Lisez attentivement cette notice avant de faire le test.

Effectuez un test jusqu'à

6 jours
avant
le retard des règles!

Si vous effectuez une détection précoce de la grossesse, utilisez les premières urines du matin. Sinon, testez à n'importe quel moment de la journée.

Évitez de trop boire avant d'effectuer le test.

Lisez votre résultat dans les 10 minutes suivant la réalisation du test.

10 minutes

1 Effectuez le test

Retirez le test de sa pochette protectrice, ôtez le capuchon et utilisez le test immédiatement.

Placez la tige contrôle:



sous votre jet d'urine

5 secondes

ou



dans un échantillon d'urine recueilli

20 secondes

IMPORTANT: la tige contrôle se colore instantanément en rose pour indiquer qu'elle absorbe l'urine. Commencez à chronométrer à partir du moment où la tige contrôle se colore en rose.

Remettez le capuchon et posez le bâtonnet-test à plat. Si la tige ne devient pas entièrement rose, consultez la section "Erreurs lors du test".

IMPORTANT: immergez entièrement la tige, comme illustré

2 Patientez



Une ligne pourrait apparaître rapidement dans la fenêtre témoin, mais vous devez **ATTENDRE 3 MINUTES COMPLÈTES** avant de lire votre résultat.

Si aucune ligne bleue n'apparaît, veuillez vous référer à la section "Erreurs lors du test".

3 Résultats

Enceinte - si votre résultat est "Enceinte", consultez votre médecin.

Image A



Fenêtre de résultat
Fenêtre témoin

Image B



Image C



Pas Enceinte (reportez-vous à la question 2).



Si vous n'êtes pas sûre de votre résultat, reportez-vous à la question 6.

SI DEUX LIGNES S'AFFICHENT, VOUS ÊTES ENCEINTE. SI LES LIGNES SONT PLUS PÂLES OU PLUS FONCÉES, CELA N'A PAS D'IMPORTANCE. Une ligne bleue doit impérativement apparaître dans la fenêtre témoin pour que votre résultat soit valide. Sinon, consultez la section "Erreurs lors du test".

IMPORTANT! Vous devez lire le résultat au plus tard **10 minutes** après avoir fait le test. Après ce délai, ne tenez pas compte d'éventuels changements.

Questions et réponses

1 J'ai obtenu un résultat "Enceinte". Que dois-je faire?
Consultez votre médecin, qui vous indiquera les étapes et les démarches à suivre. Il est possible que vous obteniez un résultat positif ("Enceinte") et que vous découvriez plus tard que vous ne l'êtes plus. Veuillez vous reporter à la question 7.

2 J'ai obtenu un résultat "Pas Enceinte". Qu'est-ce que cela signifie?
Vous n'êtes peut-être pas enceinte, ou le taux d'hormone de grossesse peut ne pas être encore suffisamment élevé pour être détecté. Effectuez un nouveau test dans trois jours. Si vous obtenez un résultat "Pas Enceinte" et que vos règles sont en retard, veuillez consulter votre médecin.

3 À partir de quand, au plus tôt, puis-je effectuer un test?
Ce test peut être utilisé jusqu'à 6 jours avant le retard des règles (5 jours avant la date présumée des règles). Toutefois, étant donné que les taux hormonaux varient d'une femme à l'autre et qu'ils peuvent être très faibles au tout début d'une grossesse, vous pourriez être enceinte mais obtenir un résultat négatif. Le tableau ci-dessous illustre le pourcentage de grossesses détectées lors de tests en laboratoire avec des échantillons d'urine recueillis en tout début de grossesse:

Jours avant le retard de règles	-1	-2	-3	-4	-5	-6
Grossesses détectées	>99 %	>99 %	>99 %	>99 %	96 %	79 %

4 Comment le test Clearblue fonctionne-t-il?
Il détecte l'hormone de grossesse hCG (gonadotrophine chorionique humaine) dans les urines. La sensibilité du test est de 10 mUI/ml. Les tests en laboratoire sont fiables à plus de 99 % dès la date présumée de vos règles.

5 Certains médicaments ou certains états médicaux peuvent-ils avoir une incidence sur le résultat?
Lisez systématiquement les instructions du fabricant relatives aux médicaments que vous prenez actuellement avant d'effectuer un test. Les médicaments contenant de la hCG et certains états médicaux rares peuvent donner lieu à des résultats positifs erronés. Une grossesse extra-utérine ou récente (même si elle n'a pas été menée à terme) peut entraîner des résultats erronés. Si vous êtes en période de ménopause ou de pré-ménopause, il se peut que vous obteniez un résultat "Enceinte" erroné, même si vous n'êtes pas enceinte. Le test ne devrait **PAS** être altéré par la prise de traitements hormonaux contenant du citrate de

clomifène, d'antalgiques, d'alcool, d'antibiotiques ou de la pilule contraceptive. Si vous obtenez des résultats inattendus, quels qu'ils soient, parlez-en à votre médecin.

6 Que faire si je ne suis pas sûre de mon résultat?
Si vous voyez deux lignes bleues dans les 10 minutes suivant la réalisation du test, vous êtes enceinte. Si les lignes sont plus pâles ou plus foncées, cela n'a pas d'importance.

Résultats "Enceinte"

Image A Ce type de résultat est plus susceptible d'être observé quand vous effectuez le test avant la date présumée des règles, alors que le taux de hCG peut être encore relativement faible.

Image B Ce résultat est typique lorsque vous faites le test à une date voisine de la date présumée de vos règles, car le taux de l'hormone hCG est peut-être encore relativement faible.

Image C Ce résultat est plus susceptible d'être observé lorsque vous effectuez le test plusieurs jours après la date présumée de vos règles, car le taux de l'hormone hCG est supérieur.

Si vous doutez encore de votre résultat, attendez au moins 3 jours avant d'effectuer un nouveau test en suivant attentivement les instructions d'utilisation

7 J'ai auparavant effectué un test et le résultat était "Enceinte". J'ai effectué un nouveau test et obtenu un résultat négatif, ou mes règles ont débuté. Qu'est-ce que cela signifie?

Il est possible que vous obteniez un résultat positif ("Enceinte") et que vous découvriez plus tard que vous ne l'êtes plus. Cela porte le nom de "fausse couche spontanée"; c'est un phénomène qui n'est pas rare et qui touche environ 1 grossesse sur 4. La plupart des femmes pourront vivre une grossesse sans problème par la suite.

8 Que puis-je faire d'autre si je prévois de concevoir?

Il est judicieux d'en parler avec votre médecin avant d'essayer de concevoir. De nombreux médecins conseillent de prendre de l'acide folique ou des compléments en vitamines prénatales, d'éviter de boire de l'alcool, de cesser de fumer et d'essayer de maintenir un poids de santé, car ces actions peuvent être bénéfiques. Vous pourriez également envisager de recourir à un test d'ovulation pour identifier vos jours les plus fertiles. Clearblue propose une gamme de ces produits pour vous aider à optimiser vos chances de conception.

Erreurs lors du test

La tige contrôle ne devient pas complètement rose.

Vous ne l'avez peut-être pas suffisamment imbibée d'urine. Cependant, vous pouvez être certaine que le test a fonctionné correctement si la ligne témoin apparaît au plus tard 10 minutes après avoir fait le test.

Aucune ligne bleue n'apparaît dans la fenêtre témoin au bout de 10 minutes après avoir effectué le test.

Le test n'a pas fonctionné, probablement parce que la tige contrôle a été imbibée de trop ou de trop peu d'urine. Veuillez effectuer un autre test en veillant à bien respecter les instructions.

Fenêtre de résultat Fenêtre témoin



www.clearblue.com

Nos conseillers sont disponibles du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, sauf jours fériés.

0800 815 46 Les appels sont gratuits.

Tous les appels sont enregistrés et peuvent être contrôlés pour assurer la qualité du service. Veuillez vous munir du produit, de l'emballage incluant la pochette en aluminium lors de votre appel.

Instructions pour Clearblue Détection Ultra Précoce, avec "CB14" imprimé sur l'emballage. Pour usage personnel à domicile. Pour diagnostic *in vitro* uniquement. Ne convient pas à une utilisation interne. Ne pas réutiliser. Garder hors de portée des enfants. Conserver entre 2 et 30 °C. En cas de stockage au réfrigérateur, sortir le dispositif et le laisser atteindre la température ambiante pendant 30 minutes avant de réaliser le test. Ne pas utiliser si la pochette protectrice est endommagée. Ne pas utiliser après la date de péremption. Jeter avec les déchets ménagers habituels. Ne pas démonter le dispositif.

Contient de petites pièces. Ne pas ingérer les composants de ce dispositif. En cas d'ingestion accidentelle, consulter un médecin. Signaler toute lésion provoquée par l'emploi de ce dispositif à Clearblue.

179 % des résultats Enceinte peuvent être détectés 6 jours avant le retard de règles (5 jours avant la date présumée des règles).

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse.

LOT	Numéro de lot	IVD	Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i>	Fabricant
Date de péremption	Température à ne pas dépasser: de 2 °C à 30 °C	Ne pas réutiliser		

Clearblue est une marque commerciale de SPD.
© 2021 SPD. Tous droits réservés.

2300471.05 03-2021 0123

